

Presentation af:

Circulation Booster®

HIGH TECH HEALTH



Innovative devices for better health.

www.hjemmetest.dk

www.hthealth.com

Hvad er Circulation Booster®?

- Registreret medicinsk udstyr (**Klasse IIa**) – ingen andre cirkulationsapparater bærer denne klassifikation

- Bruger **Elektrisk Muskel Stimulation** (“EMS”)
 - ✓ Nerverne stimuleres, så musklerne spænder og slapper af, hvilket pumper blodet tilbage til hjertet og dermed stimulerer blodcirkulationen

- **Klinisktest viser at Circulation Booster:**
 - ✓ **Forbedrer blodcirkulationen**
 - ✓ **Reducerer hævelser/ødemer**
 - ✓ **Letter ømhed og smerte**

- Over 500,000 eksemplarer solgt verden over!

- Brug den 30 min. om dagen - se resultat inden for 4 uger



Kontra-Indikationer:


- Total kontra-indikation – **må under ingen omstændigheder benyttes:**
 - ✗ 1^{ste} trimester af graviditeten
 - ✗ Pacemaker eller Automatisk Implanteret Hjerne Defibrillator (AICD)
 - ✗ Eksisterende dyb vene trombose ("DVT") - for at undgå at løsne blodproppen

- **Hvis ikke du lider af ovenstående, kan du trygt bruge Circulation Booster.**

- Lokal kontra-indikation – Brug ikke på *bestemte kropsdele*:
 - ✓ Graviditet (efter 1. trimester) – maveregionen
 - ✓ Ødelagt eller blødende hud – dæk alle opmråder for at undgå, at elektroderne kommer i kontakt med området
 - ✓ Hvis du har vævsblødninger (interne og eksterne)
 - ✓ Ved epilepsi – anvend ikke pads ne i nakkeregionen
 - ✓ Blødt væv – f.eks. Øjne, testikler.
 - ✓ Inficeret væv (inkl. Cellulitis)

Hvordan virker Circulation Booster?

- “Dit 2. hjerte”:
 - I dine ben er en række muskelpumper og en-vejs ventiler, et system kaldet ”det andet hjerte”, som pumper blodet tilbage gennem kroppen.
 - Når benenes sundhed svigter på grund af alder eller sygdom, svækkes dit "andet hjerte".
- Circulation Booster aktiverer “dit andet hjerte”:
 - Gennem mild Elektrisk Muskel Stimulation (EMS) til dine fødder aktiveres "dit andet hjerte".
 - Blodet pumpes tilbage gennem benet, forbedrer blodgennemstrømningen og reducerer væskeophobninger omkring anklerne
 - Ved regelmæssig brug, vil brugerne opleve en betydelig forbedring i blodcirkulation og nedsat hævelse indenfor 4 uger

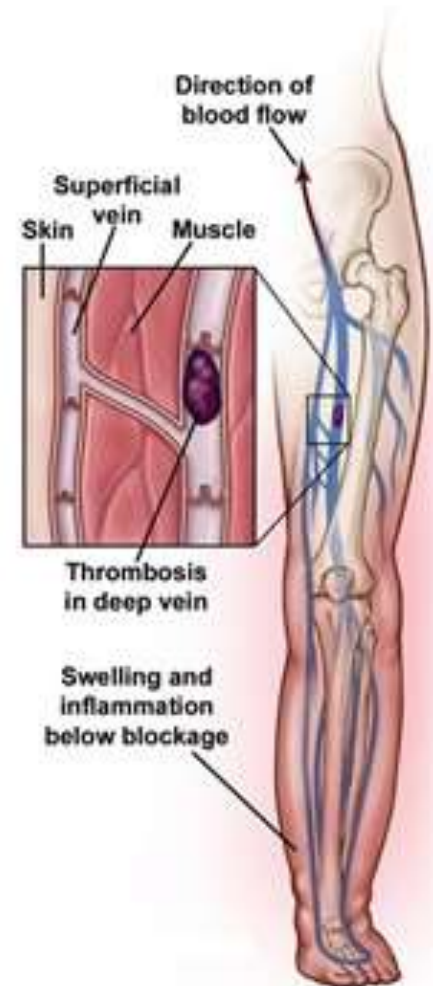

Hvad behandler den?

- Brug Circulation Booster dagligt for at afhjælpe symptomer og ubehag forbundet med:
 - ✓ Ømme og hævede ben
 - ✓ Ledegigt
 - ✓ Diabetes
 - ✓ Skinnebessår
 - ✓ Åreforsnævring i benene
 - ✓ Lymfeødemer / hævelser
 - ✓ Ophobede affaldsstoffer
 - ✓ Nerveforstyrrelser / følelsesløshed
 - ✓ Plantar fasciitis / sene inflammation
 - ✓ Dårlig cirkulation (kolde hænder og fødder)
 - ✓ Ringe mobilitet og inaktivitet
 - ✓ Forebyggelse af dyb venetrombose (DVT)
 - ✓ Raynauds syndrom
 - ✓ Stress og spændinger

Hvordan virker Circulation Booster hjælpe specifikke lidelser? (alvorlige sygdomme)




Diabetes - Enheden sikrer, at diabetikere har sunde fødder. Apparatet forbedrer blodcirkulationen og reducerer væskeretention, som sikrer, at bensår, smerte og hævelser holdes på et minimum..

Lymfeødem - er det medicinske udtryk, der beskriver symptomerne på hævelse, der kan forekomme overalt i kroppen, dog mest almindeligt på arme og ben, men er sommetider også i resten af kroppen. Cirkulationen Booster reducerer hævelser og væskeophobninger i forbindelse med Lymfeødem

Rastløse ben (RLS) er en ufrivillig trang til at bevæge benene, som er ledsaget af fornemmelser af en prikkende eller skarp smerte. Cirkulationen Booster forbedrer blodcirkulationen, hvilket igen mindsker ufrivillig trang til at bevæge benene.

MS – (Multipel sklerose) Circulation Booster hjælper til at styrke nerveender i fødder og underben.

Hvor kan puderne placeres?

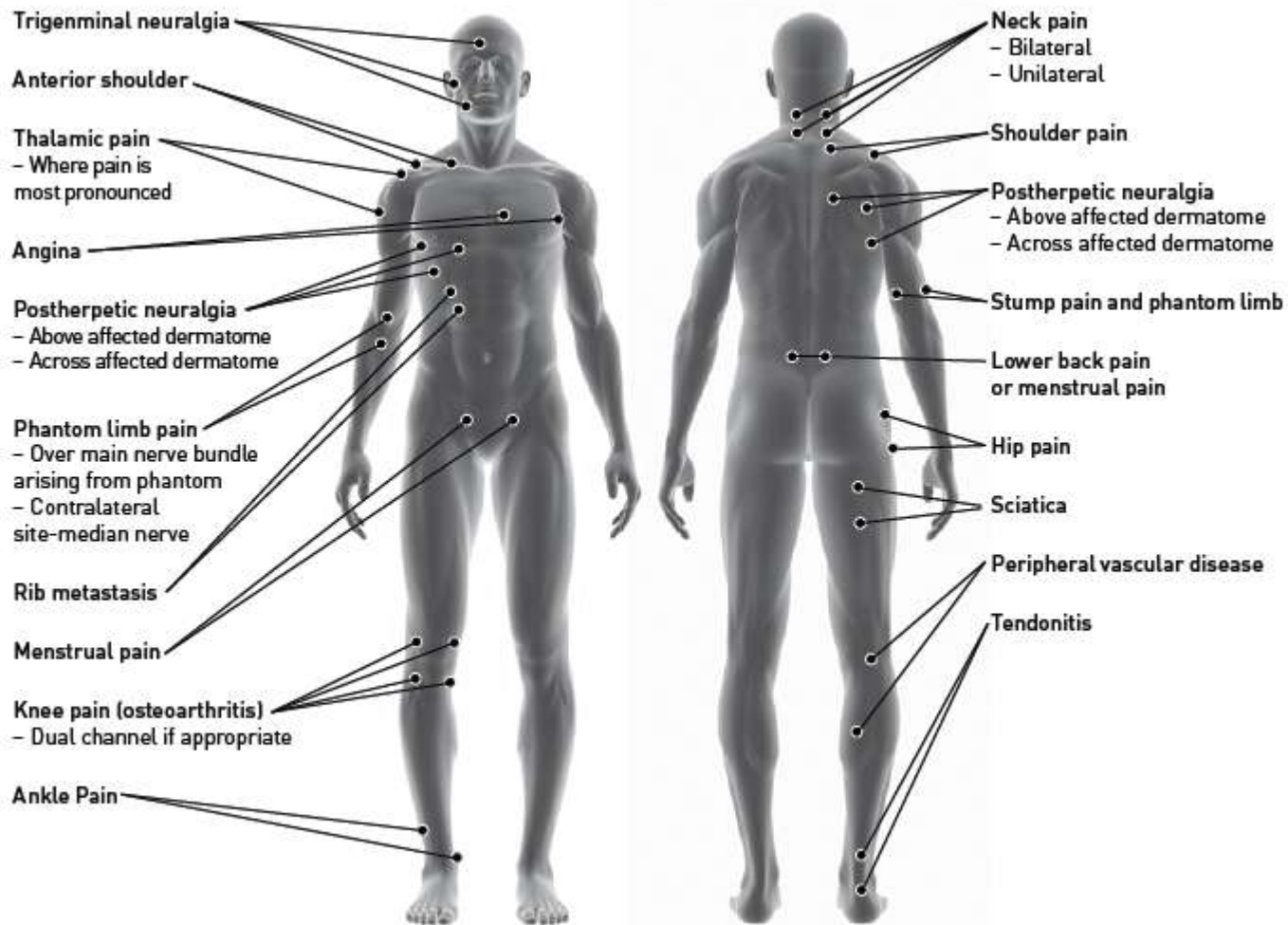

Quick Guide – Circulation Booster

- **Sæt stikket I kontakten** tryk på “POWER ON/OFF” for at tænde apparatet
- Placer dine bare fødder på **fodpuderne**
- Brug fjernkontrollen eller knapperne på selv apparatet og **indstil intensiteten** ved at bruge “-/+” knapperne på “INTENSITY SOLE”
- Fortsæt med at **øge** intensiteten indtil du føler **svage impulser I dine fødder og lægge** på et behageligt niveau (intensitets niveau 1 – 99)
- **Anbefalet** brug den op til 30 minutter pr. dag; start med 15 minutter



Få mest ud af din Circulation Booster!

- Brug fodcreme for at forbedre kontakten til fodpuderne
- Vær sikker på ikke at være dehydreret, sørg for at drikke rigeligt vand inden brug
- Begge fødder skal være i kontakt med apparatet samtidig for at kunne skabe cirkulation
- Ingen mirakelkur – brug apparatet dagligt



Quick Guide – Gel Pads

- **Isæt** stikket fra Circulation Booster
- **Forbind** puderne til ledningen på hvert sæt elektropuder
- **Placer** puderne på kroppen
- **Tilslut** ledningerne til et af stikkene placeret midt på apparatet
- Ved at bruge fjernkontrollen eller knapperne på apparatet, indstilles intensitet ved at trykke på “+/-” knapperne på **“INTENSITY BODY”**
- Indstil intensiteten så du føler en **milde elektriske** impulser, men ikke stærkere end at det stadig føles behageligt
- **Opbevar** puderne i holderne, når de ikke er i brug