

OSOM Strep-A

Sensitivitet: 96 %
Specificitet: 97,80 %
Antal reagenser: 2
Antal test: 50
Varenummer: 11141
Skup afprøvet
FDA godkendt



- 1 Dryp først 3 fritfaldende dråber fra reagens 1 i testrøret. Rosa farve.
- 2 Dryp derefter 3 frifaldende dråber reagens 2 i testrøret. Lysgul farve.
- 3 Lav en halspodning med den medfølgende swab. Placer swaben i testrøret og drej swaben rundt i testrøret mindst 10 gange. Vent 1 minut. Tryk testrøret sammen om swaben og vrid det sidste reagens ud af den. Smid swaben væk.
- 4 Placer en teststrimmel i prøverøret. Aflæs resultatet efter senest 5 minutter.

Et positivt resultat kan aflæses ligeså snart der er en rød kontrollinie og en blå testlinie. Oftest efter 1 minut.
- 5 Aflæsning af resultatet.

Positivt:

En blå testlinie og en rød kontrollinie
OBS: Den blå testlinie kan have en hvilken som helst blå nuance.

Negativt:


Der kommer kun en rød kontrollinie.




1 minut



1-5 minutter

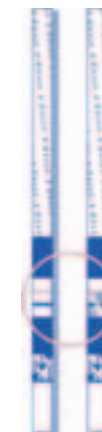

Positivt

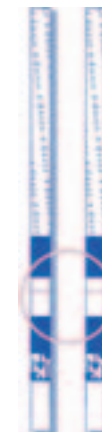

Negativt

MG MediGroup

Tel: 4576 5425
www.medigroup.dk